

Instrukcja użytkowania

Proszę przeczytać przed pierwszym użyciem!

UWAGA: mogące wystąpić różne odcienie, różnice kolorystyczne i miejscowe przebarwienia na tkaninach są zjawiskiem normalnym i nie świadczą o słabej jakości produktów. Dzieje się tak, ponieważ w związku z naturalną ciepłotą ciała i jego wilgotnością dochodzi do procesu utleniania srebra, co w konsekwencji może powodować przebarwienia.

Utlenianie srebra w żaden sposób nie ogranicza jego właściwości bakteriobójczych.

Szczególne wskazania przy stosowaniu

- Proszę wyprać powlekanie srebrem tkaniny PADY-CARE® przed pierwszym użyciem.
- Srebrne tkaniny należy nosić w bezpośrednim kontakcie ze skórą, aby zoptymalizować działanie przeciwbakteryjne i proces gojenia. Jony srebra są szybciej transportowane na skórę dzięki naturalnej ciepłocie ciała i jej wilgotności.
- Ważne jest, aby nawilżać skórę specjalistycznym kremem lub emolientem, ponieważ wilgotność kremów również przyspiesza przenoszenie jonów srebra na skórę.
- Proszę zauważyć, że powlekany srebrem materiał, charakteryzuje się bardzo wysoką jakością i elastycznością. Powyższe wymaga zachowania szczególnej ostrożności i delikatnego postępowania szczególnie w okolicach szwów (np. częste rozciąganie i szarpanie, pranie).
- Szwy powlekanej srebrem odzieży PADY-CARE® dla niemowląt i dzieci zostały umieszczone na zewnątrz, po to aby uchronić skórę przed otarciem. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wspomniana odzież może być również noszona szwami do wewnątrz.
- Nie zezwala się na przymierzanie odzieży "na próbę", gdy wcześniej skóra została nawilżona emolientem lub kremem.
- Nie ma możliwości zwrotu produktów w przypadku gdy noszą jakiegokolwiek ślady użytkowania lub gdy zostały wcześniej "przymierzone" na nawilżoną kremem/emolientem/maścią skórę.
- Aby uniknąć ryzyka uduszenia, opakowanie produktu należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Rekomendowane wskazania przy stosowaniu

Powlekanie srebrem tkaniny PADY-CARE® powinny być traktowane w taki sam sposób jak jedwab. Pierz je w pralce automatycznej, z użyciem płynu przeznaczony do delikatnych tkanin. Dla optymalnego wykorzystania tkanin, zalecamy stosowanie płynu do prania PADY-WASH®.

- Podczas prania PADY-CARE®, nie należy stosować odżywek lub płynów zmiękczejących. Zaleca się stosowanie płynnego, łagodnego detergentu.
- Prosimy prać PADY-CARE® w pralce oddzielnie, stosując program dla tkanin delikatnych lub łącznie z innymi tkaninami lecz wykonanymi z włókien syntetycznych.

Jeśli instrukcje pielęgnacji są przestrzegane jak zalecamy powyżej, pokryte srebrem tkaniny PADY-CARE® (odzież i pokrowce), zachowają swoje właściwości bakteriobójcze, aż do **200 kolejnych prań**.



Pranie w temperaturze do 30° C.



NIE należy używać środków odkażających, środków czyszczących zawierających chlor i odżywek.

NIE używać chloru.



Suszyć na wolnym powietrzu. Nie używać suszarki automatycznej bądź pralki z opcją suszenia. W bezpośrednim kontakcie z ciepłem, srebro pokrywające powierzchnię tkanin utlenia się.



Nie prasować. Powierzchnia tkanin utleni się.



Nie czyścić chemicznie.

Uwaga: alergia na srebro może prowadzić do nietolerancji produktów przez skórę!

Powlekanie srebrem tkaniny PADY-CARE® stosuje się przede wszystkim w celu złagodzenia objawów spowodowanych przez wyprysk atopowy (atopowe zapalenie skóry), grzybicę i łuszczycę, u niemowląt, dzieci i dorosłych.

Producent i Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za straty i naruszenia, które wynikły z powodu nieodpowiedniego użytkowania lub nadużyć.

Wyprodukowano dla:



BestMedicalBrands, Ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa Tel: +48 22 468 18 12
sklep@bestmedicalbrands.com www.bestmedicalbrands.com

Wyprodukowane przez:



Texamed © GmbH, Oskar-Messter-Str. 29, D-85737 Ismaning Tel: +49-89-9233 469 0; fax: +49-89-9233 469 23 info@texamed.de www.texamed.de