

# Linia Comfi™

Efektywne wspomaganie w  
leczeniu atopowego zapalenia  
skóry, egzemy i łuszczycy.

BestMedicalBrands jest polskim dystrybutorem, produktów Linii Comfi™, produkowanych przez Synergy Health (UK) Ltd, Health Solutions.

Oferowana przez nas gama produktów Comfi™ z technologią Multistretch™ powstała z myślą o rozwiązywaniu codziennych problemów przy pielęgnacji chorej skóry, szczególnie w zakresie higieny, leczenia AZS, egzemy, łuszczycy, leczenia ran, zapobiegania zakażeniom, a także prewencji i kontroli skóry w procesach pooperacyjnych (chirurgia ogólna, chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna) i po poparzeniach.

Dążymy do tego, aby zapewnić Państwu optymalne rozwiązania w zakresie leczenia i pielęgnacji skóry problematycznej, oferując elastyczne bandaże w postaci rękawa oraz specjalistyczną odzież.

Zarówno wspomniane powyżej bandaże jak i odzież specjalistyczna, produkowane są na terenie Wielkiej Brytanii. Swoim zakresem i wszechstronnością są odpowiednie do stosowania w celu leczenia poprzez stosowanie metod mokrych (wet wrapping) i suchych (dry wrapping) opatrunków, czy na przykład leczenia chorób żylnych.

## Linia Comfi™

1. Comffast™ MultiStretch™ Bandaż z technologią MultiStretch™ w postaci rękawa
2. Comffast™ Easywrap™ Odzież specjalistyczna wspomagająca leczenie



Dystrybutor w Polsce



[www.bestmedicalbrands.com](http://www.bestmedicalbrands.com)

# Comfast™ MultiStretch™

ELASTYCZNY, WISKOZOWY BANDAŻ W POSTACI RĘKAWA

Comfast™ MultiStretch™ Bandaż w postaci rękawa, został wyprodukowany przy zastosowaniu technologii MultiStretch™, pozwalającej na jego rozciąganie w wielu kierunkach równocześnie – zarówno promieniście jak i wzdłuż i w poprzek. Zaprojektowany, aby zapewnić pacjentowi całkowitą swobodę ruchu, zwiększając tym samym komfort noszenia.

Comfast™ MultiStretch™ powinien być stosowany przez pacjentów cierpiących z powodu egzemy, AZS, łuszczycy, kontrolowanego obrzęku limfatycznego czy też chorób żylnych jak i po poparzeniach i operacjach. Jednocześnie można stosować go jako materiał podtrzymujący opatrunki lub ochronę wrażliwej skóry. Alternatywnie, w metodzie mokrych opatrunków, może być stosowany jako pierwsza warstwa „mokra” bezpośrednio pod Odzież z serii Comfast™ Easywrap™.

Comfast™ MultiStretch™ bandaże w postaci rękawa to gama opatrunków opatrzonych różnymi kodami kolorystycznymi (poszczególnym kolorom przypisane zostały różne rozmiary - szerokość rękawa). Bandaże produkowane są z lekkich i oddychających materiałów.



## GŁÓWNE KORZYŚCI

- Efektywna forma „przytrzymania” głównego opatrunku bez zbędnego nacisku i napięcia
- Bezpieczny i prosty w użyciu, nie wymaga zaczepów ani taśmy mocującej
- W celu zminimalizowania strat, dostępny w wielu wariantach długości
- Trwały – wielokrotnego użytku, można go prać w pralce w temp. do 40°C
- Dostępny w 5 liniach kolorystycznych, odpowiednich dla różnych rozmiarów (obwodów) kończyn

## DODATKOWE ZALETY

- Pełna swoboda ruchu
- Zwiększony komfort pacjenta
- „Dostosowuje się” do nieregularnych/zdeformowanych kończyn
- Odpowiedni do użycia pod bandaże uciskowe i wyroby pończosznice

SZEROKOŚĆ (nierozciągnięty)	ZASTOSOWANIE	OBWÓD KOŃCZYNY	KOD 1m	KOD 3m	KOD 5m	KOD 10m
3.5cm Czerwona linia	Małe kończyny	8-15cm	FMS12	-	-	FMS15
5.0cm Zielona linia	Średnie kończyny	10-25cm	FMS22	FMS23	FMS24	FMS25
7.5cm Niebieska linia	Duże kończyny	20-45cm	FMS32	FMS33	FMS34	FMS35
10.75cm Żółta linia	Bardzo duże kończyny, Głowa, Tułów (Dzieci)	35-65cm	FMS42	FMS43	FMS44	FMS45
17.5cm Beżowa linia	Tułów (Dorośli)	50-120cm	FMS52	-	-	FMS55

# Studium Przypadku

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAPALNEGO ZGRUBIENIA SKÓRY PRZY ZASTOSOWANIU BANDAŻA COMFIFAST™ MULTISTRETCH™

Geeta Ayer. M.A. MSc, RGN Dip Derm Nursing, Non medical prescriber, Dermatology Nurse Practitioner (Manchester, England)

## PACJENT I PROBLEM

31-letni pacjent borykał się z chronicznym liszajem na dolnych kończynach. Taki stan skóry utrzymywał się przez 12 miesięcy i zawiodły wszystkie wcześniejsze próby leczenia podejmowane przez lekarza prowadzącego.

## CEL LECZENIA

Głównym celem leczenia było zredukowanie cyklu swędzenie - drapanie będącego głównym objawem zapalenia skóry. Kolejnym krokiem było leczenie suchej skóry i ograniczenie (a najlepiej całkowite zahamowanie) dalszego rozwoju choroby. Prawidłowa terapia miała ograniczyć ostatecznie swędzenie, polepszając tym samym komfort życia pacjenta.

## ZASTOSOWANA TERAPIA

Pacjent został poddany kompletnej terapii kremem emolientowym składającym się z dodawanego do kąpieli tłustego emolientu (żółta, lekka parafina) oraz kremu – główny cel, redukcja swędzenia. Lotion był stosowany jako substytut mydła. Leczenie polegało też na aplikowaniu maści Synalar pod pastą cynkową i bandażem ichthamolowym, a wszystko przykryte Bandażem Comfifast™ MultiStretch™.

## EFEKTY KLINICZNE

W okresie pierwszych 2 tygodni zredukowano swędzenie, a całkowicie zlikwidowano już po 20 dniach terapii. W 6 tygodniu terapii, kiedy dało się zauważyć istotne spłaszczenie zmian skórnych, zredukowano również częstotliwość okładów do 2 w tygodniu.

Ocena po 6 miesiącach wykazała 83% spadek aktywnych zmian zapalnych za wyjątkiem płatów suchej skóry. Pacjentowi zalecono więc codzienne stosowanie żółtej parafiny nakładanej na skórę i przykrytej Bandażem Comfifast™ MultiStretch™, celem całkowitego wyeliminowania suchych miejsc. Opisaną powyżej terapię stosowano przez kolejne 6 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy, pacjent został kompletnie uwolniony od zapalenia i problemów skórnych na wiele kolejnych miesięcy.

Pacjent potwierdził, że używanie Bandaża Comfifast™ MultiStretch™ było bardzo łatwe, bandaż ciasno przylegał i podtrzymywał inne okłady. Rozciągający się we wszystkie strony Bandaż Comfifast™ MultiStretch™ doskonale spełniał rolę przytrzymującą inne bandaże-okłady, nie wymagał od pacjenta stosowania dodatkowych zaczepów czy też pasków/taśm podtrzymujących, co w znaczący sposób przyczyniło się do efektywności zastosowanej terapii.

# Comfast™ Easywrap™

## ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA









Linia Comfast™ Easywrap™ (odzież specjalistyczna dla dzieci, nastolatków i dorosłych), została zaprojektowana w taki sposób, aby aktywnie wspomagać leczenie atopowego zapalenia skóry, egzemy, łuszczycy i innych schorzeń dermatologicznych oraz do zabezpieczenia skóry w przypadku stosowania sterydów, ciężkich emolientów lub innych maści leczniczych. Oferowany przez nas produkt ogranicza nieprzyjemny zapach leków, zabezpiecza odzież wierzchnią przed zabrudzeniem, jest przydatny w przypadkach poparzeń czy też dla pacjentów bezpośrednio po operacjach.

Pełna gama produktów Comfast™ Easywrap™ Odzież Specjalistyczna, została przygotowana w taki sposób aby można było ją stosować na całym ciele pacjenta od czubka głowy po palce stóp. Podobnie jak oferowane przez nas bandaże, została wyprodukowana przy wykorzystaniu technologii MultiStretch™, dzięki której odzież rozciąga się w dowolnym kierunku i dopasowuje do ciała dając pełnię swobody ruchów pacjenta.

Wyroby Comfast™ Easywrap™ mogą być prane w pralkach automatycznych w temperaturze do 40° C, maksymalnie 30 krotnie – nie tracąc przy tym swoich właściwości. Użyte materiały są lekkie i tak skomponowane, aby nie traciły swojej miękkości nawet po wielu kolejno powtarzanych praniach.

### GŁÓWNE KORZYŚCI

- Zwiększają absorpcję emolientów, sterydów, maści: efekt 1- lepiej nawilżona, gładka skóra, efekt 2- dłuższe działanie leku na skórę-możliwość rezygnacji z ciężkich sterydów
- Działają jak bariera redukując siłę drapania, a także łagodzą świąd i znacząco redukują efekty drapania
- Delikatne i przewiewne materiały pozwalają skórze "oddychać" oraz ograniczają przesuszanie skóry
- Pozwalają na zachowanie szczególnej higieny, chronią przed zakażeniami bakteryjnymi, są wielokrotnego użytku i nadają się do prania w pralce (max. 40° C)
- Stosowana technologia Multistretch pozwala na idealne dopasowanie do skóry w każdym miejscu ciała, nadaje się więc do noszenia pod codziennymi ubrankami przy zachowaniu pełnej swobody ruchów i dyskrecji
- Comfast ogranicza emisję brzydkiego zapachu leków oraz zabezpiecza odzież wierzchnią przed zabrudzeniem. Tłuste ciężko spieralne maści ( lub czasami szkodliwe) nie przenoszą się na pościel lub ubranie wierzchnie
- Pozostają na swoim miejscu bez użycia dodatkowych mocowań
- Doskonale uzupełniają proces leczenia poprzez swoją łatwość w użyciu, komfort i efektywność

PRODUKT	ROZMIAR; OBWÓD KOŃCZYNY	KOD
 Koszulki dorośli	Mały - Klatka piersiowa: 71 - 91cm (28" - 36") Średni - Klatka piersiowa: 91 - 117cm (36" - 46") Duży - Klatka piersiowa: 117 - 152cm (46" - 60")	CV20 CV21 CV22
 Legginsy dorośli	Mały - Talia / Biodra: 71 - 91cm (28" - 36") Średni - Talia / Biodra: 91 - 117cm (36" - 46") Duży - Talia / Biodra: 117 - 152cm (46" - 60")	CL20 CL21 CL22
 Koszulki dzieci	6 - 24 miesiące 2 - 5 lat 5 - 8 lat 8 - 11 lat 11 - 14 lat	CV24 CV5 CV8 CV11 CV14
 Pończochy	6 - 24 miesiące	CT24
 Legginsy dzieci	2 - 5 lat 5 - 8 lat 8 - 11 lat 11 - 14 lat	CL5 CL8 CL11 CL14
 Czapeczki	6 miesięcy - 5 lat 5 - 14 lat	CC5 CC14
 Rękawiczki	Do 24 miesięcy (z dziurką na kciuk) Do 8 lat (z dziurką na kciuk) 8 - 14 lat (bez dziurki na kciuk)	CM24 CM8 CM14
 Skarpetki	Do 8 lat 8 - 14 lat	CS8 CS14

# Studium Przypadku

## COMFIFAST EASYWRAP ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA

Geeta Ayer. M.A. MSc, RGN Dip Derm Nursing, Non medical prescriber, Dermatology Nurse Practitioner (Manchester, England)

### PACJENT I PROBLEM

U ogólnie zdrowej 11-latki, zdiagnozowano łuszczycę kropelkową, która przejawiała się w występowaniu wielu płaskich, łuszczących się plamek na plecach i klatce piersiowej. Powyższe objawy nasilały się wyraźnie przy występującej też ciężkiej infekcji gardła.

Dziewczynka czuła się oszpecona przez łuszczycę i dodatkowo zgłaszała, że jej rówieśnicy w szkole, bez przerwy wpatrują się w nią i komentują stan jej skóry.

### CEL LECZENIA

Głównym celem leczenia było wyeliminowanie łuszczycy i w miarę możliwości powrót skóry do jej normalnego wyglądu. Lepsze prowadzenie pacjentki oraz wpływ na przyczyny powstawania łuszczycy, mają przede wszystkim poprawić wygląd skóry ale także zminimalizować wpływ psychospołeczny, zarówno na dziewczynkę jak i jej rodziców.

### ZASTOSOWANA TERAPIA

Zaproponowano stosowanie delikatnego nakładania emulsji opartej na wykorzystaniu maści Balneum w nocy i kremów w dzień. Opisanie medykamenty były aplikowane i przykrywane opatrunkiem (stosowano Comfast EasyWrap Odzież 11-14 lat) dla zwiększenia absorpcji i lepszej wentylacji skóry.

### EFEKTY KLINICZNE

Po upływie 2 miesięcy, łuszczycza znacznie zelżała. Zaproponowano pacjentce dalsze stosowanie okładów przez kolejne 3 miesiące. Przez ten cały czas dziewczynka była uwolniona od jakichkolwiek wysypek. Dla przedłużenia działania terapii, poproszono o dalsze stosowanie emolientów.

Suche okłady (dry wrapping) przy zastosowaniu Comfast™ Easywrap™ Odzież Specjalistyczna, między innymi ograniczyły emisję na zewnątrz brzydkiego zapachu leków jak również zabezpieczyły odzież wierzchnią przed zabrudzeniem. Duża wygoda oraz łatwość noszenia Odzieży Easywrap™ pod ubrankami szkolnymi, umożliwiła pacjentce łagodniejsze i bezstresowe przeprowadzenie kuracji.

Zarówno dziewczynka jak i jej rodzice byli zachwyceni szybkim i prostym rozwiązaniem, a przede wszystkim mniej traumatycznym leczeniem. Dziewczynka przyznała, że Odzież Comfast™ Easywrap™ jest dyskretna i wygodna przez co promuje swobodną aktywność w ciągu dnia i spokojny sen w nocy.

Matka pacjentki również przyznała, że zastosowanie Odzieży Comfast™ Easywrap™ w połączeniu z emolientami pozostawiało skórę nawilżoną, zabezpieczoną przed zakażeniami i znacznie ograniczyło swędzenie.




# Metoda Mokrych i Suchych Opatrunków

Comfifast™ Multistretch™ i Comfifast™ Easywrap™ pozwalają na efektywną, codzienną pielęgnację przy wykorzystaniu metody mokrych i suchych opatrunków. Opatrywanie skóry z AZS czy egzemą pozwala ją chronić i zapobiega skutkom drapania się przez noszącego.

Opatrunki pozostawiają emolienty i leki w bezpośrednim kontakcie ze skórą, zmiękczając ją, nawilżając i jednocześnie pozwalają na ich lepszą absorpcję. Dzięki temu istnieje możliwość stosowania łagodniejszych leków dla uzyskania efektów podobnych do tych, które są spodziewane po stosowaniu np. sterydów. Dodatkowo przy stosowaniu opatrunków mokrych, skóra jest schłodzona (dzięki wilgoci, dochodzi do efektu parowania) – jest to szczególnie ważna zaleta gdy aura nie sprzyja leczeniu i jest gorąco. Metoda okładów redukuje swędzenie, pozwala spokojnie przespać noc i cieszyć się aktywnością podczas dnia, zwiększają komfort życia pacjenta.

Stosowanie metody mokrych opatrunków i równoczesne polepszanie się kondycji skóry, prowadzą do przejścia na metodę opatrunków suchych, a w następnym leczeniu zostaje zredukowane do kąpieli przy użyciu emolientów, aż do wyzdrowienia.

Przygotowaliśmy dla Państwa także DVD z filmem instruktażowym wspierającym metody leczenia AZS i egzem z użyciem produktów Comfifast™ Multistretch™ i Easywrap™. Zainteresowanych otrzymaniem darmowego DVD prosimy o kontakt na adres: [wsparciemedyczne@bestmedicalbrands.com](mailto:wsparciemedyczne@bestmedicalbrands.com)

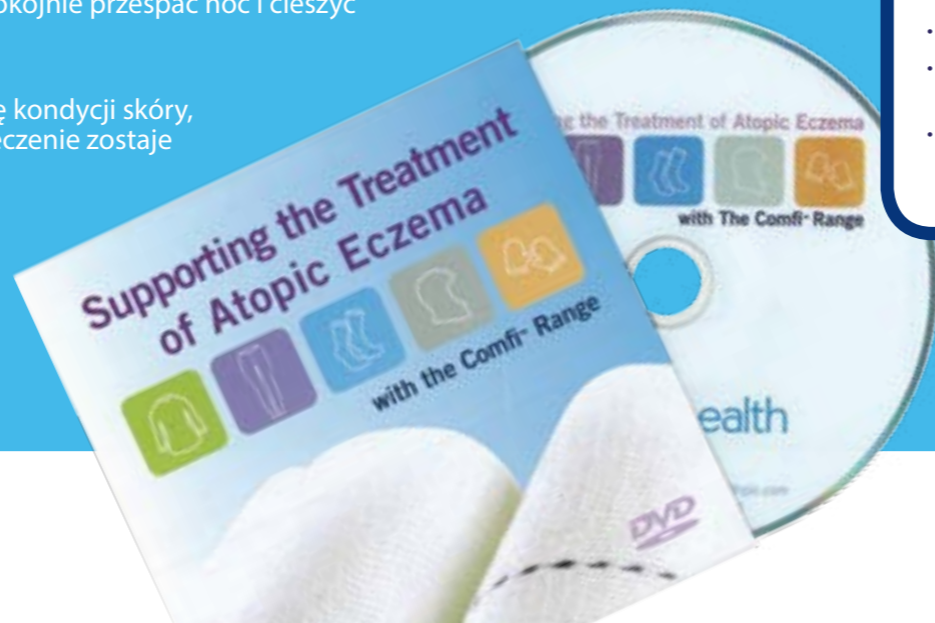

## GŁÓWNE KORZYŚCI

Mokre i suche opatrunki z zastosowaniem Bandaży Comfifast™ MultiStretch™ i Odzieży Comfifast™ Easywrap™

- Zwiększają absorpcję emolientów, sterydów, maści: efekt 1- lepiej nawilżona, gładka skóra, efekt 2- dłuższe działanie leku na skórę - możliwość rezygnacji z ciężkich sterydów
- Mokre okłady schładzają skórę (dzięki wilgoci dochodzi do efektu parowania), to szczególnie ważna zaleta gdy jest gorąco i aura nie sprzyja leczeniu
- Działają jak bariera redukując siłę drapania, a także łagodzą świąd i znacząco łagodzą skutki drapania
- Zapobiegają przedostawianiu się emolientów, past, maści na ubranie i pościel pacjenta
- Dyskretne, gdy noszone pod ubiorem
- Pozostają na miejscu bez potrzeby stosowania dodatkowych mocowań typu zaczepy/paski/tasiemki/plastry
- Poprzez swoją efektywność, wygodę i prostotę jest komplementarne w prawidłowym leczeniu pacjenta

## Dystrybutor



BestMedicalBrands, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, Polska  
Telefon: +48 504 415 416 Email: [sklep@bestmedicalbrands.com](mailto:sklep@bestmedicalbrands.com)  
[www.bestmedicalbrands.com](http://www.bestmedicalbrands.com)

## Producent



Synergy Health (UK) Ltd, Healthcare Solutions, Matrix Park, Chorley PR7 7NB. England  
Telephone: +44 (0)1772 299900 Fax: +44 (0)1772 299901 Email: [healthcaresolutions@synergyhealthplc.com](mailto:healthcaresolutions@synergyhealthplc.com)  
[www.synergyhealthplc.com](http://www.synergyhealthplc.com)

As our policy is one of continuous improvement, we reserve the right to modify designs without prior notice.

Comfi, Comfifast, MultiStretch, Easywrap, Comfinette, Comfitube, Comfigauz, Comfipression are trademarks of Synergy Health plc.  
© Synergy Health plc 2012 SHI3950